

# DIALAB®

# QUICK GUIDE

## DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette

**NASEN-RACHENABSTRICH:**

**1 Vorbereitung**

10 Tropfen Puffer

**2 Probengewinnung**

**3 Testdurchführung**

6 Mal

60 Sek

das Röhrchen drücken

**4 Interpretation der Ergebnisse**

4 Tropfen der Lösung

15 Min

+ positiv   - negativ   X ungültig

**NASAL SWAB:**

**1 Preparation**

10 drops of Buffer

**2 Sample Collection**

**3 Test Procedure**

6 Times

60 sec


squeeze the tube

**4 Interpretation of Results**

4 drops of Solution

15 min

+ positive   - negative   X invalid

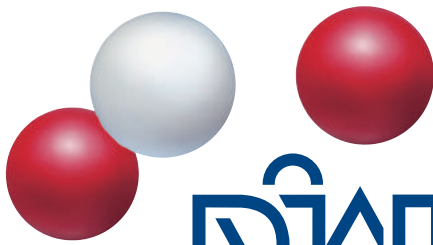

# DIALAB®

# QUICK GUIDE

## DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette

TAMPONE NASOFARINGEO:

**1 Preparación**

**2 Recogida de Muestras**

**3 Procedimiento de Análisis**

**4 Interpretación de Resultados**

HISOPADO NASAL:

**1 Preparación**

**2 Recogida de Muestras**

**3 Procedimiento de Análisis**

**4 Interpretación de Resultados**